



Mark X

User Manual

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser Alcovisor® Mark V.


Alcovisor® Mark V utilise un capteur électrochimique afin de détecter et de mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré d'un individu.

Bien que Alcovisor® Mark V soit très simple d'utilisation, il est important de suivre les procédures à chaque utilisation. Détourner de la bonne procédure n'affectera normalement pas le résultat du sujet. Toutefois, l'intégrité et la compétence de l'opérateur, et même la légalité de la procédure peuvent être remise en question, s'il est prouvé que l'opérateur n'avait pas suivi les bonnes procédures d'utilisation.


QUESTION PRE-TEST

Certains aliments et même certaines boissons non alcoolisées peuvent contenir des traces d'alcool, qui affecteront le résultat des tests, dû aux résidus d'alcool contenu dans la bouche. Pour y remédier, il faut observer une période de 20 minutes après la dernière consommation. Certains médicaments peuvent contenir de l'alcool. Un verre d'eau avant le test peut diluer la salive, réduisant ainsi temporairement le volume d'alcool dans l'haleine. Un délai d'au moins 2 minutes doit être pris entre le temps de la dernière cigarette et le test.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

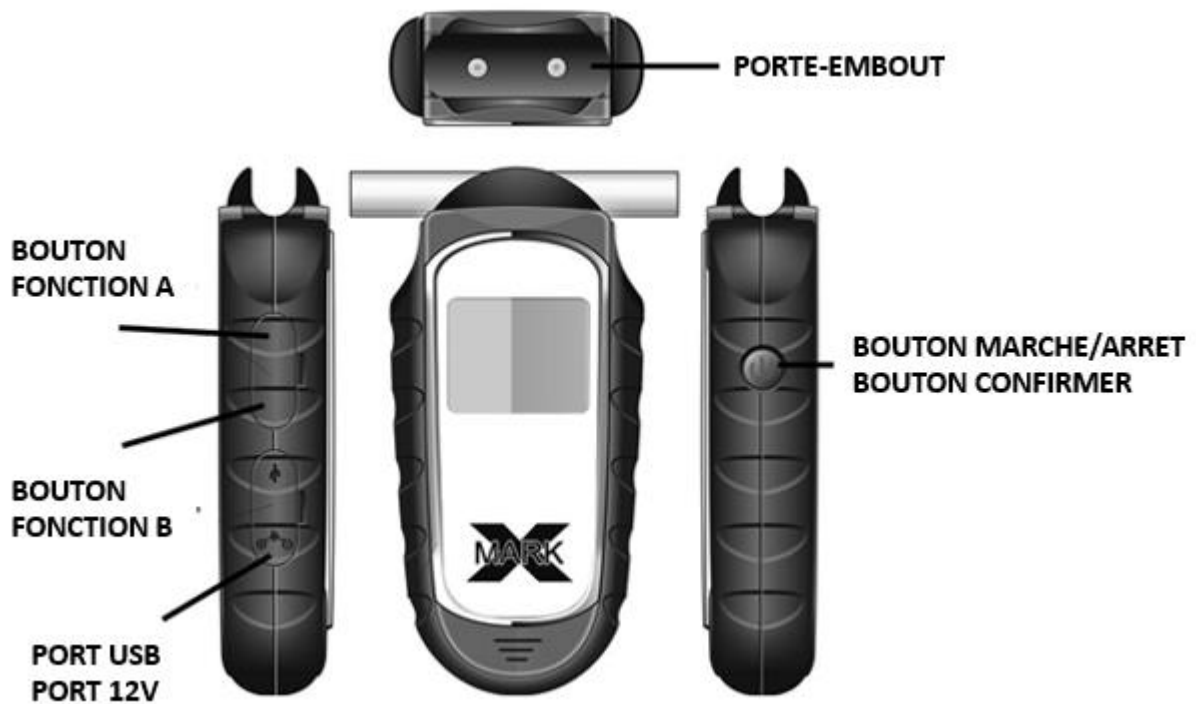

DESCRIPTION DES ICONES

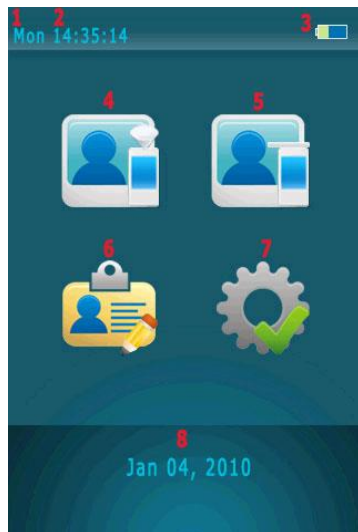

1	Jour de la semaine
2	Heure
3	Niveau de charge de la batterie
4	Test de dépistage
5	Test standard
6	Résultat des tests
7	Réglage
8	Date



Écran précédent / Annuler



Écran suivant / Confirmer



Écran principal



Imprimante




Recommencer le test

MODE D'EMPLOI



Test de dépistage



1. Fixez un embout buccal sur le porte-embout.
2. Sélectionnez l'icône "Test de dépistage" avec les boutons fonctions A et B puis "confirmer".
3. Lorsque "Please Blow" s'affiche, inspirez profondément puis soufflez dans la coupelle d'échantillonnage jusqu'à l'arrêt du BIP sonore.
4. "Alcohol Detected" ou "No Alcohol" s'affiche à l'écran.
5. Un test passif peut être effectué en sélectionnant "Manual" pendant que le sujet testé souffle.
6. Sélectionnez  pour commencer un autre test.
7. Si "Alcohol Detected" s'affiche, effectuez un test standard avec un embout buccal afin d'obtenir un résultat précis de la concentration d'alcool.

REMARQUE : Le test de dépistage ne sert qu'à détecter la présence ou pas d'alcool dans l'haleine. Pour un résultat de test fiable, il faut passer par un test standard.

REMARQUE : Les résultats de test de dépistage sont imprimables ou sauvegardables.






Test standard

1. Insérez un embout dans l'emplacement prévu à cet effet.
2. Sélectionnez l'icône "Test standard" à l'aide des boutons fonction A et B puis valider avec le bouton "confirmer".
3. Lorsque "Please Blow" s'affiche, inspirez profondément puis soufflez jusqu'à l'arrêt du BIP sonore.
4. Le résultat s'affichera à l'écran.
5. Si vous disposez d'une imprimante, connectez le à l'appareil avec le câble qui est fourni, puis mettez-le en marche. Après que le résultat soit affiché, sélectionnez  pour lancer l'impression.
6. Sélectionnez  pour commencer un nouveau test.
7. Si le sujet testé ne souffle pas dans les 30 secondes, l'opérateur du test peut sélectionner "Refuse" pour confirmer que le sujet refuse de passer le test, ou peut sélectionner "Recommencer le test" pour permettre au sujet de retester.
8. Si le sujet testé ne produit pas un test d'haleine valide, l'opérateur peut sélectionner "Discontinue" pour confirmer; ou sélectionner "Recommencer le test" pour permettre au sujet de refaire le test.
9. Un test passif peut être effectué en sélectionnant "Manual" pendant que le sujet testé souffle.



Résultat des tests

1. 2 000 enregistrements peuvent être stockés.
2. Utilisez  ou  pour naviguer d'un enregistrement à l'autre.
3. Afin d'imprimer un enregistrement, sélectionnez l'enregistrement souhaité, connectez l'imprimante à l'appareil avec le câble qui est fourni, puis mettez-le en marche, sélectionnez  pour lancer l'impression.




Réglage


1. Date et heure

- i. Configurez la date et heure.
- ii. Choisissez "Update" pour confirmer.

2. Arrêt automatique

- i. Sélectionnez le temps d'inactivité avant l'arrêt automatique de l'appareil.
- ii. Sélectionnez  pour confirmer.

3. Impression

- i. Sélectionnez "Auto Print" afin que les résultats soient imprimés automatiquement après chaque test.
- ii. Sélectionnez le nombre d'impression désirée.
- iii. Sélectionnez  pour confirmer.
- iv. Si la date du calibrage doit apparaître sur l'impression, sélectionnez "Cal."

4. Calibrage

- i. Lorsque s'affiche sur l'écran "Calibration Needed", faites calibrer votre appareil.
- ii. Un mot de passe sera nécessaire afin d'assurer qu'il soit effectué par une personne habilitée.
- iii. Veuillez-vous référer aux instructions de calibrage.

5. Réglage avancé

- i. Seules les personnes habilitées sont autorisées à modifier le réglage avancé.
- ii. Un mot de passe est exigé.
- iii. Veuillez-vous référer aux instructions de réglage avancé.